



Instalación inicial del Transmisor Merlin@home®

Paso 1

Conexión a la red telefónica:

Transmisor terrestre (línea telefónica fija): Conecte la clavija a la toma de teléfono de la pared.

Toma de teléfono de la pared

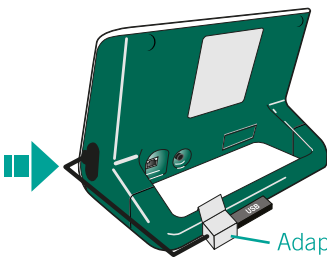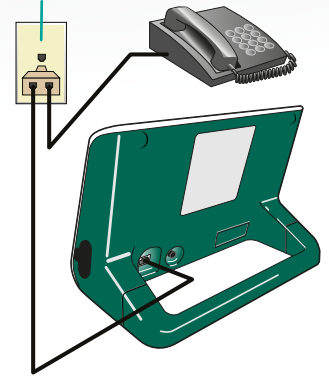



Transmisor móvil (USB móvil):

Conecte el adaptador móvil al puerto USB del lateral derecho del transmisor.

Paso 2

Conexión del transmisor a la corriente eléctrica:

Conecte la fuente de alimentación a la toma eléctrica de la pared.

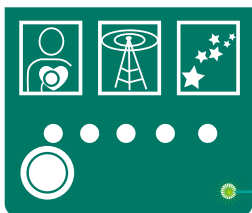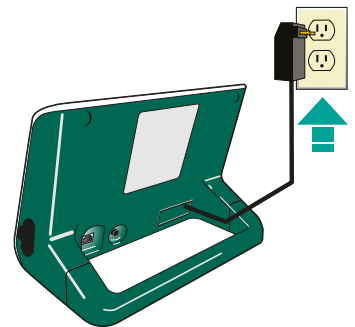

Espere a que la luz verde del indicador de alimentación se encienda.

(C) Indicadores de progreso

(A) Botón de inicio



Paso 3

Acerque y oriente la parte delantera del transmisor hacia su dispositivo (a menos de 20 cm.) y pulse el botón de inicio (A) durante 1-2 segundos hasta que escuche un pitido. A continuación suelte el botón y observará que se ilumina el icono de lectura (B) y los indicadores de progreso (C) se iluminarán de uno en uno de izquierda a derecha. Este paso puede durar algunos minutos e irá acompañado de pitidos.



(B) Icono de lectura

Paso 4

Cuando se ilumine el icono central de la torre puede alejar el transmisor. El transmisor comienza a transmitir y observará de nuevo los indicadores de progreso que se iluminarán de uno en uno de izquierda a derecha. Este paso puede durar algunos minutos e irá acompañado de pitidos.



Icono torre



ST. JUDE MEDICAL™

Paso 5

El icono de estrellas se iluminará cuando la instalación se haya finalizado. Deje el transmisor enchufado, y con la parte delantera orientada hacia el lugar donde duerme.







Icono estrellas

¡El transmisor ya está instalado!

A partir de ahora el transmisor monitorizará su dispositivo según la programación del hospital.

Errores frecuentes

1. Los indicadores de progreso parpadean a la vez (a veces acompañado con pitidos)

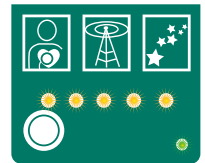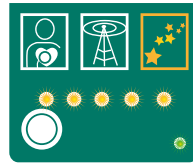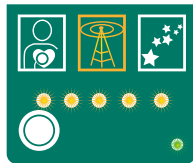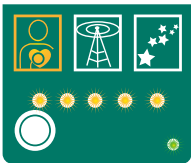


Posible solución:

- Compruebe que todas las conexiones son correctas
- Pulse una vez el botón de inicio (pulsar y soltar)
- Si el problema persiste, llame a **Merlin Responde**, al número de teléfono gratuito 900 921 920.

2. La luz verde del indicador de alimentación no se enciende

Posible solución:

- Compruebe que todas las conexiones son correctas
- Si el problema persiste, llame a **Merlin Responde**, al número de teléfono gratuito 900 921 920.

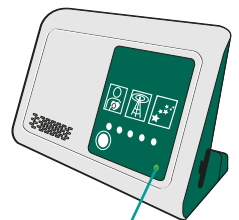

Luz verde del indicador de alimentación

Merlin Responde

Contacta con nosotros en el teléfono gratuito 900 921 920 de lunes a viernes de 08:30 a 18:00 h.

Breve resumen: Antes de usar estos dispositivos, revise las instrucciones de uso, donde encontrará una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles reacciones adversas y modo de empleo.

A menos que se especifique lo contrario, el símbolo TM indica que el nombre es una marca comercial de St. Jude Medical, o una licencia concedida a esta empresa o a una de sus filiales. ST. JUDE MEDICAL y el símbolo con nueve cuadrados son marcas comerciales y de servicio de St. Jude Medical, Inc. y sus empresas asociadas. © 2016 St. Jude Medical, Inc. Reservados todos los derechos.

St. Jude Medical Inc.

Global Headquarters
One St. Jude Medical Drive
St. Paul, Minnesota 55117 / USA
+1 651 756 2000 / +1 651 756 3301 Fax

smj.com

St. Jude Medical Inc.

Implantable Electronic Systems
15900 Valley View Court
Sylmar, California 91342 / USA
+1 818 362 6822 / +1 818 364 5814 Fax

